


<b>Especificações</b>	Viseira de Proteção com sistema rotativo que permite a elevação do visor (posição aberto/fechado)	
	Composição	Viseira; Suporte de viseira; Fita de fixação
	Cores	Suporte Regulável para ajuste: Cinzento
	Dimensões Suporte Regulável	230 x 144.47 mm / Espessura: 2 mm
	Dimensões da viseira	260.91 x 299.60 mm / Espessura: 1.5 mm
	Resistência à Temperatura <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suporte regulável</li> <li>▪ Material</li> </ul>	Até 30°C
<b>Materiais</b>	Viseira	Polycarbonato
	Suporte de viseira	Polipropileno
	Fita de fixação	PVC Medical
<b>Aplicações</b>	<p>A Viseira de Proteção WV-01 foi concebida para proteger o rosto e os olhos de salpicos e aerossóis de secreções respiratórias e outros produtos biológicos. Compatível com óculos e máscara e regulável através de fita elástica. A Viseira de Proteção WV-01 é especialmente indicada para utilização em meio social e laboral onde possa ocorrer risco de projeção de fluidos orgânicos provenientes da respiração. É também recomendada para utilização em locais de atendimento/contacto com o público.</p> <p><b>Atenção!</b> Não confere proteção respiratória contra agentes biológicos nocivos.</p> <p><b>Contraindicações:</b> Não são conhecidas contraindicações na utilização da Viseira WV-01, no entanto, materiais que podem entrar em contacto com a pele do utilizador podem causar reações alérgicas em indivíduos suscetíveis.</p>	
	<p>A Viseira de proteção facial, referência Viseira WV-01 foi considerada segura tendo em conta a utilização prevista, de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425.</p> <p>As matérias-primas utilizada no fabrico da Viseira WV-01, não possuem riscos associados à utilização prevista no contacto com o rosto, os olhos ou a pele.</p> <p>A Viseira WV-01 é fabricada de forma a assegurar a satisfação e o conforto do utilizador, tendo em vista a sua proteção, os requisitos definidos pelas entidades competentes e a característica de ser um produto seguro para a utilização prevista.</p>	
<b>Avaliação de Riscos</b>	<p>A Viseira de proteção facial, referência Viseira WV-01 foi considerada segura tendo em conta a utilização prevista, de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425.</p> <p>As matérias-primas utilizada no fabrico da Viseira WV-01, não possuem riscos associados à utilização prevista no contacto com o rosto, os olhos ou a pele.</p> <p>A Viseira WV-01 é fabricada de forma a assegurar a satisfação e o conforto do utilizador, tendo em vista a sua proteção, os requisitos definidos pelas entidades competentes e a característica de ser um produto seguro para a utilização prevista.</p>	
<b>Requisitos Essenciais</b>	<p>Foram considerados os requisitos essenciais de saúde e segurança para a Viseira WV-01 conforme previsto no Regulamento (UE) 2016/425 e na norma EN 166:2001 (Pontos 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.2.4; 9 e 10).</p> <p>A Viseira WV-01 foi concebida tendo em conta os requisitos básicos de conceção para a proteção do rosto contra salpicos de líquidos, nomeadamente através de ergonomia; utilização dos materiais adequados; com um tipo de acabamento superficial adequado nas zonas em contacto com o utilizador com conforto e eficiência, sendo fornecidos com marcação adequada ao nível de proteção e instruções de utilização.</p>	
<b>Normas</b>	<p>A Viseira WV-01 é fabricada tendo em conta as Normas Harmonizadas e Regulamentação aplicáveis, ou seja: normas EN 166: 2001 (6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.2.4; 9 e 10) e EN 168: 2001 (12 e 18) e Regulamento (UE) 2016/425.</p>	
<b>Armazenamento; Uso e Manutenção</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Após produção, o artigo é armazenado à temperatura ambiente e em local seco e fresco, afastado de fontes internas de calor, sendo mantido o maior tempo possível na caixa de transporte.</li> <li>- Este produto deve ser higienizado antes da primeira utilização.</li> <li>- A Viseira de proteção quando reutilizada deve ser higienizada antes e após cada utilização com soluções à base de água ou com álcool a 70%. Após cada utilização, recomenda-se guardar a Viseira num local limpo e seco, evitando a exposição solar direta.</li> <li>- Antes de cada utilização, a viseira deve ser verificada com cuidado para assegurar a conformidade da mesma.</li> <li>- Evitar choques e quedas de objetos pesados em cima da Viseira.</li> </ul> <p><b>Atenção!</b> Não usar diluentes, acetonas ou derivados.</p> <p><b>Validade:</b> Caso a Viseira se apresente com picadas, riscada ou danificada deve ser substituída.</p>	
<b>Limpeza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpar com água morna, sabão e um pano macio ou com solução desinfetante não abrasiva utilizando papel ou tecido não rugoso;</li> <li>- A desinfecção pode também ser efetuada com imersão da Viseira nas mesmas soluções desinfetantes;</li> <li>- Não usar solventes ou abrasivos.</li> </ul>	



<p><b>Marcação</b></p>	<p>A Viseira de Proteção WV-01 possui uma marcação, com o seguinte significado:</p> <p><b>Marcação na ocular:</b>  <b>3 NSBS</b> significando que se trata de uma Viseira de Proteção com bom reconhecimento de cores, fabricada por NSBS, Unipessoal, Lda.</p> <p><b>Marcação na estrutura de suporte:</b>  <b>NSBS EN166 3</b> significando que se trata de uma Viseira de Proteção com proteção contra salpicos de líquidos, fabricada por NSBS, Unipessoal, Lda.</p>
<p><b>Instruções de Montagem</b></p>	
<p><b>Indicações de uso</b></p>	<p>Colocar o suporte na cabeça, com a viseira a proteger a face e ajustar a fita elástica.</p>
<p><b>Informações do Fabricante</b></p>	<p>NSBS, Unipessoal, Lda.          Rua 23 de Outubro, Nº4          Moita          2445-583 Marinha Grande          Telf.: 919269594          Email: geral@nsbs.pt</p>
<p><b>Data/ Versão</b></p>	<p>06/04/2021   00</p>